

## Gesichtsschutz (Face-shield): Bauanleitung

- Diese Anleitung ermöglicht es zwei angeleiteten Kräften, innerhalb von 8 Stunden ca. 150 dieser Gesichtsschutzmasken anzufertigen.
- Die Visiere sind in den Krankenhäusern und Altenpflegeheimen der Region im Einsatz, trageleicht und absolut einsatztauglich.
- Je nach ihrem Arbeitseinsatz (1x zum Abstrich) oder am Patientenbett muss der Anwender entscheiden, ob nach Gebrauch die Entsorgung, Desinfektion oder der ganztägige Gebrauch gerechtfertigt ist.
- Wir haben an 3 Tagen (=22 Stunden) mit 2 Personen insgesamt 500 Stück hergestellt.
- **Kosten:**

Material:	0,20 Euro
Student:	ca. 1,00 Euro/Maske
Versand:	nach IST-Kosten



### Erforderliche Utensilien:




- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Folie:           | 0,3 mm Stärke; DIN A4    |
| Gummiband:       | 8 mm breit               |
| Stirnband:       | 20 mm breit (Schrägband) |
| Panzerklebeband: | 19 mm breit              |

## Vorgehen:

1. Zurechtschneiden der Folie (3 cm an der langen DIN 4 Seite abschneiden; Dieser Streifen wird nicht für die weitere Produktion benötigt)

Abrundung der Ecken

**Löcher stanzen! (Siehe blaue Pfeile)**

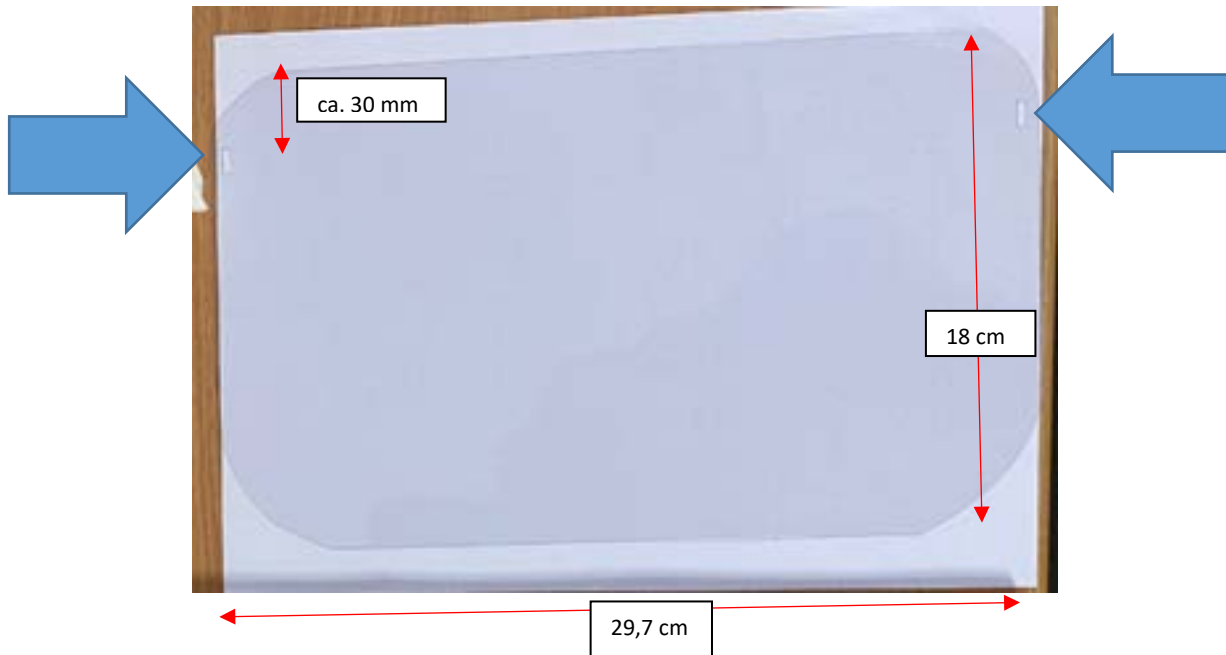

Maße: 29,7 cm x 18 cm

2. **Zurechtschneiden der Bänder** (Stirnband und Gummiband)

Länge des Gummibandes: 35 cm

Länge des Stirnbandes: 27,5 cm


3. **„Antackern“ des Stirnbandes an der Innenseite**

Das Stirnband wird auf Höhe der Löcher 2 cm umgeklappt und anschließend zwei Mal getackert.




#### 4. Befestigung des Gummibandes an den Außenseiten

Das Gummiband wird 3 cm durch das Loch gezogen und anschließend zwei Mal getackert.

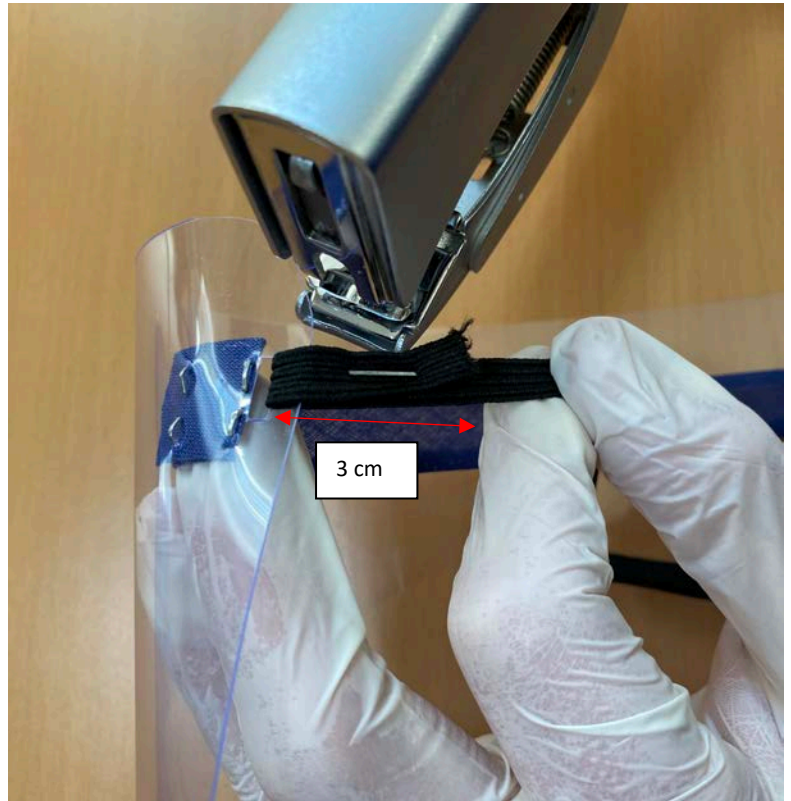

#### 5. Abkleben der Klammern

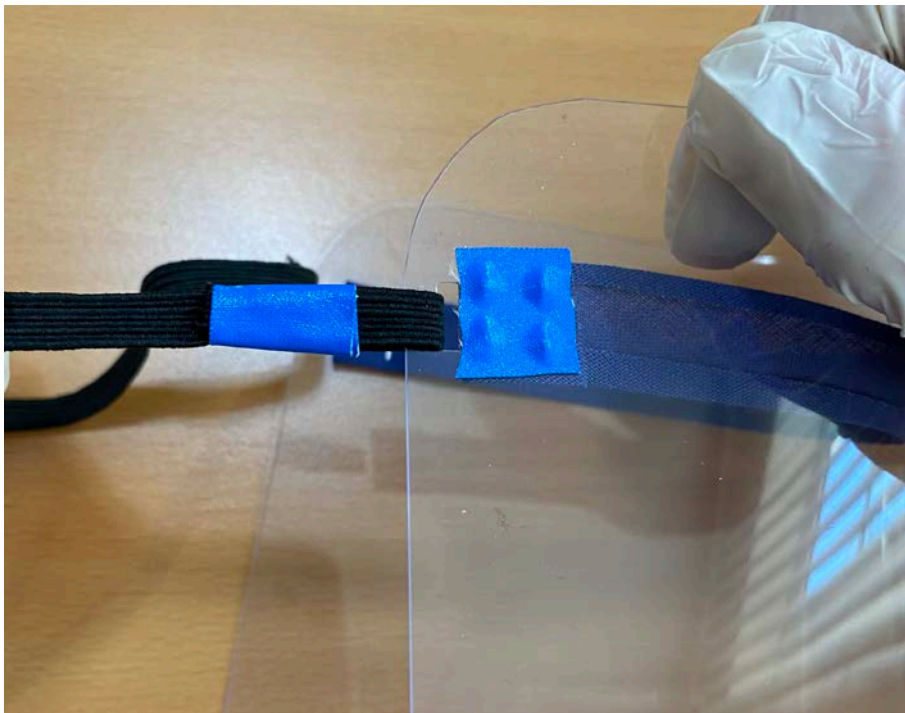

#### 6. Fertig für den Einsatz!